

## 骨穿标本固定及脱钙操作流程

1. 骨髓标本取出后，立即 Bouin 氏固定液固定，固定过夜。
2. 标本从固定液取出以后，放入进口 EDTA 脱钙液，脱钙液体积 5 倍于骨穿标本，脱钙 4-5 小时。
3. 脱钙后，流水冲洗 15 分钟，包好后，常规脱水、制片。可以保证得到满意的免疫组化实验结果。

**注：**骨髓标本 Bouin 氏固定液固定的优点，HE 染色后，易于区分原红和原粒

原红：核均匀致密，苏木素染核，染色较深。

原粒：核不均匀，呈大小不一颗粒状，核染色相对较淡。

### Bouin 氏固定液配方

饱和苦味酸水溶液：甲醛水溶液：冰醋酸=15:5:1

相关产品：ZLI-9307 进口脱钙液 120 元/100ml

### 骨髓瘤免疫组化套餐

CD38、CD138、CD56、Ki67、Kappa、Lambda

